

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Медицинские кровати с механической регулировкой секций предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: кровать общебольничная, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметров | Значение параметров |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) | 890x905x2055* |
| 2. Количество секций | 3 |
| 3. Количество регулируемых секций | 3 |
| 4. Размер нижней секции (ДхШ) | 548x820 |
| 5. Размер головной секции (ДхШ) | 720x820 |
| 6. Размер промежуточной секции (ДхШ) | 418x820 |
| 7. Масса | 54 кг |

*Размеры указаны без учета бамперов
Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы кровати рекомендуется производить:

- осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций);
 - осмотр ножек кровати (надежность их фиксации к раме ложа), проверку надежности крепления спинок.
- В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом.
Допустимая статическая нагрузка до 240 кг.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Кровать общебольничная может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.
Кровать общебольничная устанавливается на ровную, горизонтальную поверхность.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при температуре -50°С... +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С.
Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.
Изготовитель не несет ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Кровать изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Медицинские кровати с механической регулировкой секций предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: кровать общебольничная, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметров | Значение параметров |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Габаритные размеры (ВхШхГ) | 890x905x2055* |
| 2. Количество секций | 3 |
| 3. Количество регулируемых секций | 3 |
| 4. Размер нижней секции (ДхШ) | 548x820 |
| 5. Размер головной секции (ДхШ) | 720x820 |
| 6. Размер промежуточной секции (ДхШ) | 418x820 |
| 7. Масса | 54 кг |

*Размеры указаны без учета бамперов
Отклонение веса указанного в таблице - ±10%

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы кровати рекомендуется производить:

- осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций);
 - осмотр ножек кровати (надежность их фиксации к раме ложа), проверку надежности крепления спинок.
- В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом.
Допустимая статическая нагрузка до 240 кг.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Кровать общебольничная может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.
Кровать общебольничная устанавливается на ровную, горизонтальную поверхность.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при температуре -50°С... +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С.
Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.
Изготовитель не несет ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Кровать изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____